

# Technisches Datenblatt

Technical Data Sheet



Artikelnummer: 99391H-S , 99391H-M , 99391H-L

## Nitrilhandschuhe **CE** EN 455, unsteril, blau, 100 Stück

### Beschreibung

Untersuchungs- und Schutzhandschuhe aus Nitril, unsteril, puderfrei, zum Einmalgebrauch

### Anwendbare Standards

Medizinprodukt der Klasse I gemäß RL 93/42 EWG geeignet für Untersuchungen/Arbeiten im medizinischen Bereich.  
Geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln gemäß Europäischer Resolution Res AP (2004) 4.  
CE- zertifiziert.

### Maße

Größe	S	M	L
<b>Länge</b> ( Median in mm)	min. 240	min. 240	min. 240
<b>Breite</b> ( Median in mm)	84 (+/- 3)	94 (+/- 3)	105 (+/- 3)
<b>Gewicht in gr.</b>	4,8 (+/- 0,2)	5,2 (+/- 0,2)	5,7 (+/- 0,2)

### Produktinformationen

Material	Nitril
Pudergehalt	puderfrei
Sterilisation	nicht steril
AQL- Wert ( Acceptable Quality Level )	1,5
Form	beidhändig tragbar

### Verpackung / Lagerung

Größe	S	M	L
Artikelnummer	99391H-S	99391H-M	99391H-L
Mengeneinheit	Stück		
Art der Einzelverpackung	Spenderbox		
Menge in der Einzelverpackung	100		
Maße der Einzelverpackung	12 x 7,4 x 22,5 cm		
Einzelverpackung pro Karton ( VE)	10		
Kartonmaße ( T*B*H)	38 x 24,5 x 26 cm		
Haltbarkeit	3 Jahre		
Kennzeichnung	Charge / Herstellungsdatum / Mindesthaltbarkeitsdatum		
Lagerung	Trocken zwischen 5 - 35 °C . Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden. In einem Raum ohne ätzendes Gas und mit guter Belüftung lagern.		

# Qualitätssicherung

<b>Produktbezogene Normen</b>	EN 455: 2015 / EN 455-2: 2015 / EN 455-2015
<b>Qualitätszertifikate</b>	EN ISO 10993-5 / EN ISO 10993-12 / EN ISO10993-10 / EN ISO 10993-2 CE - Zertifizierung

## Gebrauchsanweisung

### Anziehen der Handschuhe

1. Wählen sie die passenden Handschuhe aus.
2. Überprüfen sie die Gültigkeitsdauer der Handschuhe auf der Verpackung und die Dichtigkeit der Verpackung.
3. Vor dem Tragen von Handschuhen Hände waschen oder desinfizieren.
4. Öffnen Sie die Handschuhpackung. Heben sie die Öffnung der Verpackung mit einer Hand an, nehmen sie die Handschuhe mit den gespreizten Fingern heraus und führen sie die Hand in den Handschuh ein.
5. Heben sie die Öffnung der Verpackung wie oben beschrieben an. Halten sie einen weiteren Handschuh mit der behandschuhten Hand und führen sie die andere Hand in den Handschuh ein. Legen sie Ihre Hände zusammen und passen sie die Handschuhe an, indem sie die Finger kreuzen.

### Ausziehen der Handschuhe

1. Greifen sie das Ende des Handschuhs mit behandschuhten Fingern und ziehen sie den Handschuh nach unten.
2. Halten sie den entfernten Handschuh mit der behandschuhten Hand fest und greifen sie mit der nicht behandschuhten Hand nach dem Ende der Innenseite des Handschuhs, um den Handschuh nach unten zu ziehen.
3. Halten sie die entfernten Handschuhe mit der Innenseite nach außen. Entsorgen sie die benutzten Handschuhe in einem medizinischen Abfalleimer und waschen sie ihre Hände.

## Wichtige Hinweise

1. Dieses Produkt ist ein Einwegprodukt und muss nach der Verwendung entsprechend der gültigen Vorschriften entsorgt werden. Durch chemische oder biologische Substanzen verunreinigte Produkte müssen entsprechend den Vorschriften für die betreffenden Chemikalien und / oder infektiösem Material entsorgt werden.
2. Bei Schäden an der Verpackung ist eine Nutzung untersagt.
3. Dieses Produkt ist nicht flammhemmend.
4. Im Falle von Auffälligkeiten bei diesem Produkt sollten sie den Hersteller bzw. den Verkäufer umgehend darüber in Kenntnis setzen.
5. Dieses Produkt entspricht der Europäischen Resolution Res AP (2004) 4, die für den Kontakt mit Lebensmitteln vorgesehen ist, und wird nicht für fettige Lebensmittel empfohlen.

## Hersteller

Jiangsu Cherish Medical Technology Co., Ltd  
Add: No.55Maqianan Chaoyang Road, Jiaoxi Centralized Industrial Zone,  
Zhenglu Tianning, Changzhou City, CHINA

## Vertrieb Europa

CMC Medical Devices & Drugs S.L  
Horacio Lengo N° 18  
CP 29006, Málaga - Spain

**Erstellt von:**

**Anhalt GmbH  
Willy - Brandt - Ring 12  
67592 Flörsheim - Dalsheim, Germany**

**Ort, Datum**

**Flörsheim - Dalsheim, den 01.06.2021**